

## 가동식 손잡이(로크 포함) 사용 방법


아래의 가동식 손잡이는 로크하는 기능이 있습니다. 사용 방법을 잘 읽고 올바르게 사용하여 주십시오. 로크 기능이 없는 「NS-CM4」는 손잡이가 수평 상태일 때만 손잡이로 사용하십시오.

### ⚠ 경고

#### ❗ 반드시 실행


로크 기능이 있는 손잡이를 사용할 때는 반드시 로크가 걸리는 위치에서 로크를 고정하십시오. 또 사용 후에도 나중에 사용할 사람을 위해서 로크를 고정해 두십시오. 로크를 고정하지 않고 사용하면 넘어져서 부상을 입을 우려가 있습니다.

## NS-CM1n 가로 가동식

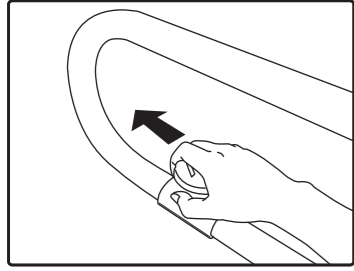

### 1 로크의 해제

검은 레버를 잡고 화살표 방향으로 슬라이드시켜 로크를 해제하고 손잡이를 가동시킵니다.(가동이 시작되면 레버를 놓아도 로크는 걸리지 않습니다.)

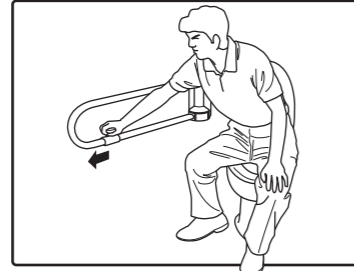

### 2 45°로 로크해서 사용


45° 위치에서 로크가 걸려 사용할 수 있습니다. 다시 레버를 화살표 방향으로 슬라이드시켜 로크를 해제하면 손잡이를 가동시킬 수 있습니다.



### 3 90°로 로크해서 사용

90° 위치에서 로크가 걸려 사용할 수 있습니다. 다시 레버를 화살표 방향으로 슬라이드시켜 로크를 해제하면 손잡이를 가동시킬 수 있습니다.

## NS-CM3 세로 가동식

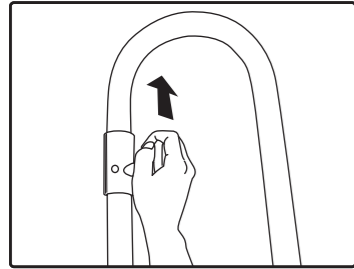

### 1 로크의 해제 (그림은 90° 로크 상태)

검은 레버를 잡고 화살표 방향으로 슬라이드시켜 로크를 해제하고 손잡이를 가동시킵니다.(가동이 시작되면 레버를 놓아도 로크는 걸리지 않습니다.)



### 2 45°로 로크해서 사용

45° 위치에서 로크가 걸려 사용할 수 있습니다. 다시 레버를 화살표 방향으로 슬라이드시켜 로크를 해제하면 손잡이를 가동시킬 수 있습니다.



### 3 0°로 로크해서 사용

0° 위치에서 로크가 걸려 사용할 수 있습니다. 다시 레버를 화살표 방향으로 슬라이드시켜 로크를 해제하면 손잡이를 가동시킬 수 있습니다.

NAKA CORPORATION

<http://www.naka-kogyo.co.jp>



## 취급 설명서

고객용

## 항균제 함유 보조 손잡이 Ai-no-te NS 시리즈

### 안전상의 주의

만일의 비상시에 대비하여 사용 전에 본서를 잘 읽으신 후 올바르게 사용하십시오. 또 이곳에 표시된 주의사항은 상황에 따라 중대한 결과로 이어질 가능성이 있습니다. 모두 안전에 관한 중요한 내용을 기재하고 있으므로 반드시 지켜주십시오.

### 용어 및 기호, 그림 표기의 설명

**⚠ 경고** 이 표시를 무시하고 잘못된 취급을 하면 사람이 사망 또는 부상을 입을 가능성이 예상되는 내용을 나타내고 있습니다.

**⚠ 주의** 이 표시를 무시하고 잘못된 취급을 하면 물적 손해의 발생이 예상되는 내용을 나타내고 있습니다.

**⚠** 기호는 주의(경고를 포함)를 촉구하는 내용을 알리는 것입니다. 그림 속이나 근처에 구체적인 주의 내용(왼쪽 그림의 경우는 감전)이 그려져 있습니다.

**🚫** 기호는 금지 행위(해서는 안 되는 일)를 알리는 것입니다. 그림 속이나 근처에 구체적인 주의 내용(왼쪽 그림의 경우는 분해 금지)이 그려져 있습니다.

**❗** 기호는 행위를 강제하는 것(반드시 할 것)을 알리는 것입니다. 그림 속이나 근처에 구체적인 주의 내용이 그려져 있습니다.

### 이용하기에 앞서

### ⚠ 경고



금지

**정기적으로 흔들림이 없는지 확인하고, 흔들림이 있는 상태로 사용하지 않는다.**  
손잡이의 파손 및 탈락으로 부상을 입을 우려가 있습니다.



반드시 실행

**젖은 손이나 비누가 묻은 손으로 손잡이를 사용할 때나 손잡이가 젖어 있거나 비누가 묻어 있을 때는 충분히 주의해서 사용한다.**  
손이 미끄러져 중대한 사고로 이어질 우려가 있습니다.



반드시 실행

**도움이 필요한 사용자의 경우, 보호자는 사고가 발생하지 않도록 충분히 주의한다.**  
사용자가 손잡이를 헛잡는 등에 의해 중대 사고로 이어질 우려가 있습니다.



반드시 실행

**손잡이와 벽 사이에 손이나 팔이 들어가지 않도록 충분히 주의해서 사용한다.**  
손이나 팔이 끼이는 등에 의해 중대 사고로 이어질 우려가 있습니다.



반드시 실행

**가동식 손잡이(세로 가동식·가로 가동식)를 조작할 때는 가동 범위에 아무것도 없는 것을 확인한다.**  
손잡이에 신체를 부딪쳐 넘어지는 등에 의해 부상을 입을 우려가 있습니다.



반드시 실행

**가동식 손잡이(로크 있음)를 사용할 때는 반드시 로크의 잠금 여부를 확인한다.**  
로크가 확실하게 잠겨있지 않고 로크가 빠짐으로 인해 부상을 입을 우려가 있습니다.



반드시 실행

**사용 방법 라벨을 사용자가 보기 쉬운 장소에 부착한다.**  
오사용 등에 의해 부상을 입을 우려가 있습니다.



반드시 실행

**가동식 손잡이는 천천히 조작한다.**  
난폭하게 조작하면 손잡이가 파손되어 부상을 입을 우려가 있습니다.



금지

**분해·개조는 하지 않는다.**  
손잡이의 파손 및 탈락에 의해 부상을 입을 우려가 있습니다.



금지

**손잡이 이외의 용도(매달리거나 위에 올라타거나 흔들거나 걷어차거나)로 사용하지 않는다.**  
손이 미끄러지면서 손잡이가 빠지거나 하여 부상을 입을 우려가 있습니다.



금지

**강한 충격은 주지 않는다.**  
손잡이의 파손 및 탈락에 의해 부상을 입을 우려가 있습니다.

**경고**


- 금지** 가동식 손잡이의 가동 시에는 손가락을 끼우지 않는다.  
가동부에 손가락을 넣어 손잡이를 가동시키면 부상을 입을 우려가 있습니다.
- 금지** 세로 가동식 손잡이(로크 없음)가 튀어 올라온 때는 손잡이로 사용하지 않는다.  
손잡이 부분이 가동함에 따라 넘어져 부상을 입을 우려가 있습니다.
- 금지** 가동식 손잡이의 가동부에 물을 뿌리지 않는다.  
가동식 손잡이의 기능을 잃어 부상을 입을 우려가 있습니다.
- 금지** 손잡이에는 필요 이상의 힘을 가하지 않는다.  
손잡이의 허용 정하중은 연직하중 1000N, 수평하중 300N(연직하중 약 100kgf, 수평하중 약 30kgf)입니다. 이 하중 이하라면 안전하게 사용할 수 있는 범위를 나타냅니다.

**주의**

- 부탁** 정기적인 점검을 한다.  
오랫동안 깨끗한 상태를 유지하기 위해서 평소에는 부드러운 천으로 마른 걸레질을 하십시오. 오염이 심할 때는 부드러운 천을 중성세제의 1~2%의 수용액에 적시고 잘 짠 후에 오염된 부분을 닦아내십시오.
- 불 엄금** 담배 등의 불을 가까이 하지 않는다.  
손잡이가 타거나 녹아 내릴 우려가 있습니다.
- 금지** 알칼리·산성(약산성 포함)·염소계 세제를 사용하지 않는다.  
알칼리성 세제 및 산성 세제, 염소계 세제를 사용하면 부품이 변색이나 열화 되는 경우가 있습니다.
- 금지** 권장품 이외의 클렌저를 사용하지 않는다.  
권장품 이외의 크림 클렌저, 나일론 수세미 등의 훼손되기 쉬운 것을 사용하면 부품 표면에 상처가 나거나 변색되는 경우가 있습니다.

**손질 방법**

갓나무의 오염은 일상의 손질로 미관·청결함을 유지할 수 있습니다. 일상의 손질로 깨끗해지지 않는 오염인 경우에는 아래와 같은 요령으로 손질해 주십시오.

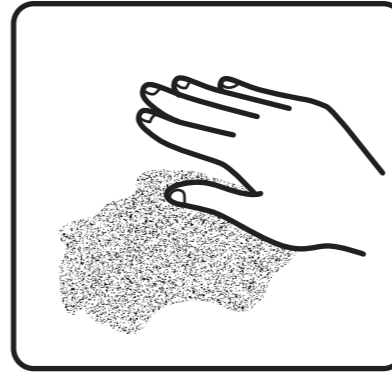

손때 등

물걸레질 또는 가정용 세제 등을 이용하여 닦아내십시오.  
● 가정용 세제를 사용할 경우는 부드러운 천을 중성세제의 1~2%의 수용액에 적셔 잘 짠 후에 오염을 닦아내고, 마지막에 물걸레질과 마른걸레질을 하여 세제분이 손잡이 표면에 남지 않도록 하십시오.



기름, 크레용 등의 오염 이물의 부착

가정용 세제, 강력 세제(감귤류 세제) 등을 이용하여 닦아내십시오. 잘 없어지지 않는 오염은 권장품 크림 클렌저로 닦아내십시오.  
● 세제를 사용할 경우는 부드러운 천을 중성세제의 1~2%의 수용액에 적셔 잘 짠 후에 오염을 닦아내고, 마지막에 물걸레질과 마른걸레질을 하여 세제분이 손잡이에 남지 않도록 하십시오.  
● 크림 클렌저는 너무 문지르면 광택이 사라지므로 주의하십시오. 광택이 사라진 경우에는 광택제를 문힌 천으로 닦아 광택을 회복시켜 주십시오.



찰과상·베인 상처


샌드 페이퍼, 광택제를 이용해서 마무리하십시오.  
● 샌드 페이퍼는 거친 것부터 부드러운 것(#120→#240~#400→#1000)의 순서로 문질러서 마무리하십시오. 샌드 페이퍼로 사라진 광택은 광택제를 문힌 천으로 광택을 회복시켜 주십시오.

**권장품**

○가정용 세제  
Mypet(Kao)  
Magiclean(Kao)



○크림 클렌저  
Homing Tough(Kao)  
Jif(Nippon Lever)

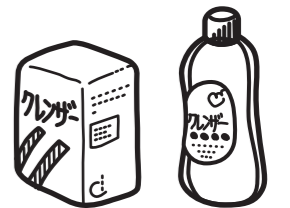

○강력 세제  
Orange ace(Daikyo)  
Orange man(yuwa)



○광택제  
Rinrei all 왁스(Rinrei)



○샌드 페이퍼  
사포(홈센터 등에서 구입)  
거친 사포 : #120  
미세한 사포 : #240 ~ #400, #1000