

# レストハンド 背もたれ BHA K型

## 安全上のご注意

使用前に本書をよくお読みの上、正しく使用してください。また、ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。お読みになったあとも、すぐに取り出せる場所に大切に保管してください。

### 用語および記号、絵表記の説明

- 警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡またはケガを負う可能性が想定される内容を示しています。
- 注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、物的損害の発生が想定される内容を示しています。
- △** 記号は、注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は感電)が描かれています。
- 記号は、禁止の行為(してはいけないこと)を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
- 記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容が描かれています。

### ご利用にあたって

#### 警告

- 必ず実行** **介助が必要な使用者の場合、介助者は、事故が発生しないように十分注意する**  
使用者の体が背もたれからズレるなどにより、重大事故につながるおそれがあります。
- 禁止** **分解・改造はしない**  
背もたれの破損や脱落により、ケガをするおそれがあります。
- 禁止** **背もたれ以外の用途(ぶら下がったり、上に登ったり、ゆすったり、けったり)に使わない**  
背もたれが外れるなどにより、ケガをするおそれがあります。
- 禁止** **強い衝撃は与えない**  
背もたれの破損や脱落により、ケガをするおそれがあります。
- 禁止** **定期的に、ガタツキがないか確認し、ガタツキがある状態で使用しない**  
背もたれの破損や脱落により、ケガをするおそれがあります。

#### 注意

- お願い** **定期的な点検をする**  
いつまでもきれいな状態を保つために、ふだんは柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどいときは、柔らかい布を中性洗剤の1~2%の水溶液に浸し、よく絞ってから汚れた部分を拭き取ってください。
- 裸火厳禁** **たばこなどの火を近づけない**  
背もたれが焦げたり、溶けたりするおそれがあります。
- 禁止** **アルカリ・酸性(弱酸性含む)・塩素系洗剤を使用しない**  
アルカリ性洗剤や酸性洗剤、塩素系洗剤を使用すると、部品が変色や劣化をすることがあります。
- 禁止** **推奨品以外のクレンザーを使用しない**  
推奨品以外のクリームクレンザー、ナイロンたわし等の傷つけやすいものを使用すると、部品表面に傷がついたり、変色することがあります。

### お問い合わせ先は、こちらまで

ご使用の製品の型式および、不具合の内容をご確認のうえ、ホームページもしくはQRコードへアクセスください。  
やさしさと安心を たしかな技術で支えます。

**ナカ工業株式会社** URL <http://www.naka-kogyo.co.jp>

**ナカテクノタタル株式会社** URL <http://www.naka-techno.co.jp>


●商品改良のため、記載内容については予告なしに変更することがありますのでご了承ください。●無断転載を禁じます。



携帯のカメラで左のQRコードを読み取りアクセスしてください。

## お手入れ方法

日常の手入れにより、美観・清潔感を保つことができます。日常のお手入れで落ちない汚れの場合には、下記の要領でお手入れしてください。

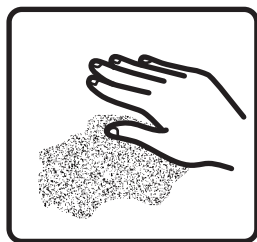

### 手あかなど

水拭きまたは、家庭用洗剤などを用いて、拭き取ってください。

- 家庭用洗剤を使用する場合は、柔らかい布を中性洗剤の 1~2%の水溶液に浸し、よく絞ってから汚れを拭き取り、最後に水拭きと空拭きを行い、洗剤分が手すり表面に残らないようしてください。



### 油、クレヨン等の 汚れ異物の付着

家庭用洗剤、強力洗剤（柑橘類洗剤）などを用いて、拭きとってください。頑固な汚れは、推奨品のクリームクレンザーで拭き取ってください。

- 洗剤を使用する場合は、柔らかい布を中性洗剤の 1~2%の水溶液に浸し、よく絞ってから汚れを拭き取り、最後に水拭きと空拭きを行い、洗剤分が手すり表面に残らないようしてください。
- クリームクレンザーは、擦りすぎると光沢が落ちますので注意してください。光沢が落ちた場合は、ツヤだし剤を付けた布で拭き光沢を回復させてください。

## 推奨品

### ○家庭用洗剤

マイペット（花王）  
マジックリン（花王）



### ○強力洗剤（柑橘類洗剤）

オレンジエース（ダイキョー）  
オレンジマン（yuwa）



### ○クリームクレンザー

ホームグタフ（花王）  
ジフ（日本リーバ）



### ○ツヤ出し剤

リンレイ all ワックス（リンレイ）



## 背もたれカバー（オプション品）について

以下の点に注意してください。

### ●背もたれカバーを洗濯の際は、洗濯方法タグを確認する

誤った方法で洗濯すると、カバーが破損するおそれがあります。

### ●背もたれカバーのアイロンがけは、120度以下の温度で、あて布を使用する

温度が高い、あて布を使用しないと、カバーが焦げたり、溶けたりするおそれがあります。

### ●背もたれカバーのアイロンがけは、スチーム機能を使用しない

カバーが変色したり、溶けたりするおそれがあります。

品質表示: 表層/ポリウレタン 100%  
基布/ポリエステル 100%



背もたれカバーは、いつまでも清潔にお使い頂けるよう、取外して洗濯が可能です。製品に付属の洗濯方法タグに従い正しい方法で洗濯してください。


## 背もたれカバーの取付け方法

1



※タグを上にする

2

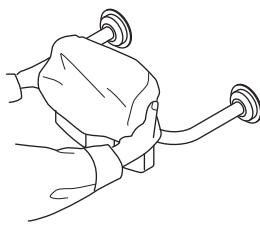

3

